

Spranz 24 aktiv

Gebrauchsanweisung

Pflegehinweise

Risikohinweise

Produkt: Leistenbruchband
Artikelart: Maßgefertigtes Bruchband, doppelseitig
Artikel-Nr.: S24100

CE

Für die Gewährleistung der optimalen Funktion und für den möglichst langen Erhalt seiner Qualität, sollten Sie nachfolgende Regeln zur Anwendung und Pflege des Bandes sowie die Risikohinweise beachten.

Hersteller:
Spranz Medizinprodukte GmbH
Robert-Bosch-Straße 33
73431 Aalen
Tel.: 07361 37003
Fax: 07361 370040
info@spranzband.de
www.spranzband.de

Spranz 24 aktiv

Indikation

Vollständig reponierbarer Bruch

Kontraindikation

Nicht vollständig reponierbarer Bruch, arterielle Verschluss-erkrankung (AVK), chronisch venöse Insuffizienz (CVI), Verletzungen oder Erkrankungen der Haut im Bereich der aufliegenden Pelotten, Inkarzeration.

Risikohinweise


für die Verwendung des Leistenbruchbandes Spranz 24 aktiv: Bei der konservativen Versorgung äußerer Hernien mit dem maßgefertigten Leistenbruchband Spranz 24 aktiv sind bei richtigem Anlegen gemäß der Gebrauchsanweisung bisher keine Risiken bekannt. Die Ursächlichkeit des Entstehens eines Genitalödems durch das Tragen des Spranz 24 aktiv konnte nicht nachgewiesen werden.

Gleichwohl werden in der Literatur folgende Nebenwirkungen für Bruchbänder und Bruchbandagen nicht näher definierter Herkunft und ohne Angabe der Bauart beschrieben: Schwächung der Bauchdecke, Schädigung der Haut aufgrund dauerhafter lokaler Reibung (Makula amyloidose, Entzündungen, Ödeme, Ulzerationen etc.), arterielle Thrombose, eventuelle Größenzunahme des Bruches, Einklemmungen des Bruchsackes können nicht sicher verhindert werden.

Beim Auftreten von (anhaltenden) Beschwerden Bruchband ablegen und gegebenenfalls Arzt aufsuchen.


Bruchbänder und Bruchbandagen dienen der Versorgung eines Patienten. Eine Wiederverwendung ist nicht zulässig!

Spranz 24 aktiv

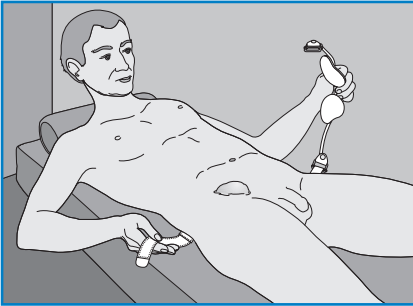


geeignet bei allen Größen von Leisten- oder Hodenbrüchen

1. Am bequemsten können Sie Ihr Spranz 24 aktiv im Liegen anlegen. Legen Sie sich bitte rücklings auf dessen Rückengurt (etwa 2-3 cm oberhalb des Steißbeins) und ziehen Sie es unter dem Körper straff.

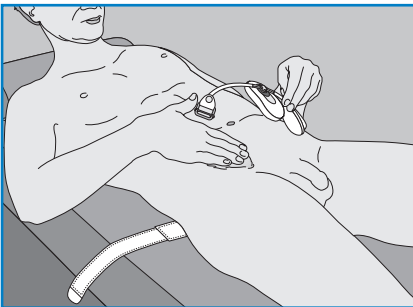


2. Halten Sie mit einer Hand den Bügel mit den Pelotten bereit, mit der anderen führen Sie vorsichtig Ihren Bruch vollständig zurück.

3. Drücken Sie dann die Bruch-Pelotte fest auf die Bruchforte, so dass der Bruch nicht mehr austreten kann. Mit der freien Hand straffen Sie das lose Textilband-Ende des Rückengurtes.

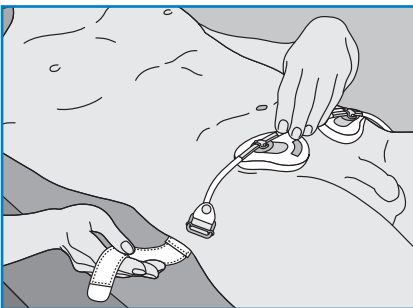

4. Halten Sie die Bruch-Pelotte weiterhin fest. Führen Sie jetzt das Klettband durch die Metallschleufe (Schnalle). Ihr Bruch wird jetzt von Ihrem Spranz 24 aktiv zurückgehalten.

5. Abschließend sollten Sie nochmals den korrekten Sitz und die Spannung Ihres Spranz 24 aktiv überprüfen.

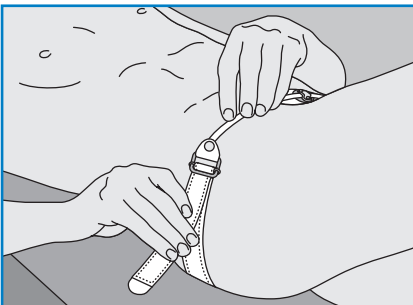

6. Um Ihr Spranz 24 aktiv zu öffnen, brauchen Sie nur den geschlossenen, d.h. angedrückten Klettverschluss aufzureißen.

Spranz 24 aktiv

Pflegehinweise



Bügel, Pelotten und Rückenband mit einem feuchten Lappen (max. 30°) abreiben.

Nicht für Waschmaschine, Handwäsche oder chemische Reinigung geeignet!

Wird der Lederüberzug des Bandes durch erhöhte Schweißbildung oder Verwendung eines zu feuchten Lappens feucht, an der Luft trocknen lassen.

Um Hautirritationen vorzubeugen, ist tägliche Körperpflege im Bereich des Bruchbandes empfohlen. Das Bruchband nur auf völlig abgetrockneter Haut anlegen.

Verwendete Materialien

Bügel: Stahl, vernickelt
Leder
Kontaktkleber für Sanitätshäuser

Pelotten: Aluminium
Stahl, vernickelt
Baumwolle
Leder
Zellkautschuk
Kontaktkleber für Sanitätshäuser

Rückenband: Baumwolle
Elastan
Gummi
Polyamid
Silikon
Viskose