

Gebrauchsanleitung

Antidekubitussysteme

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir, die Firma Bandagen-Fischer Holm Oettel e.K., haben Ihnen ein Hilfsmittel geliefert.

Zur Vermeidung von Komplikationen und zum Erhalt der Funktion lesen und befolgen Sie bitte zusätzlich zur Gebrauchsanweisung des Herstellers, die folgenden grundsätzlichen Hinweise.

Sollten Probleme auftreten, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen bzw. Reparaturen an dem Hilfsmittel vor. Es ist ein Medizinprodukt, für das spezielle Regelungen nach dem Medizinprodukt-Gesetz (MPG) gelten.

Gebrauchshinweise

Aufbau der Matratze:

- Bett komplett frei räumen
- Bei ungepolsterten Matratzen unter der Luftkammer eine 5cm hohe Schaumstoffauflage legen (Sicherheit bei Stromausfall und Defekt)
- Matratze richtungsorientiert auf die Auflage legen (Schläuche am Fußende) und ggf. fixieren
- Luftzufuhrschläuche ungeknickt zum Aggregat führen und verbinden
- Netzstecker mit dem Stromnetz verbinden, Gerät einschalten, Einstellung entsprechend der Vorgabe des Patientengewichts einstellen
- Spannbettuch, Inko-Auflage auflegen
- Nach Füllung der Matratze Patient ins Bett legen
- Kontrolle des Durchliegens (Hand soll noch unter dem Steiß Platz zur Matratze haben)
- Kontrolle nach ggf. erforderlichen Korrekturen
- Regelmäßige Kontrollen sind erforderlich

Fehlersuche:

- Aggregat ist eingeschaltet und am Stromnetz eingesteckt (Kontrolle der Steckdose) ?
- Fehleranzeige ? Hört man ein Motor- bzw. Pumpgeräusch ?
- Einstellung am Aggregat richtig (> Handtest) ?
- CPR-Verschluß geschlossen ? (Not-Schnellablass zur Reanimation > meist an der rechten Kopfseite) ?
- Anschluss-Schläuche ggf. geknickt bzw. nicht angeschlossen ?
- Zellen kontrollieren (Achtung bei Wechseldruck-Einstellung ist im Wechsel immer 1 Zelle luftleer)

Bei Problemen bzw. wenn Sie weiter Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Abteilung REHA-Technik Fa. Bandagen-Fischer OETTEL Orthopädietechnik

Pausaer Str. 99, 08525 Plauen **Tel. 03741 / 40410-15**

Kirchplatz 4, 08626 Adorf **Tel. 03741 / 40410-40**

info@fischer-oettel.de

www.fischer-oettel.de

Notfall-Rufnummer: 03741 / 40410-66