


Langen Riemen durch die Umlenkschleufe führen.



Etwas nachziehen und den Riemen durch das Klettband sichern.

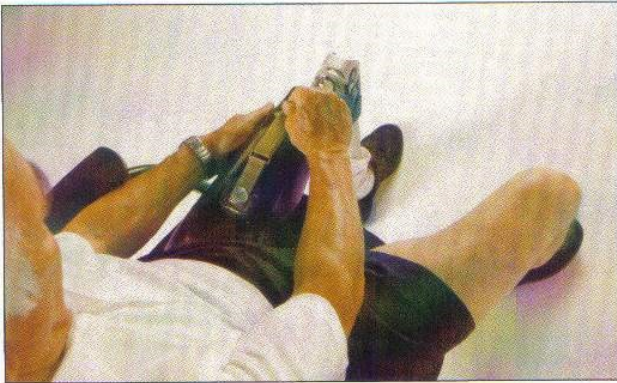


Sollte eine Kosmetik gewünscht sein, die für das Kniegelenk vorgesehene Kosmetik auswählen und nach einer der folgenden drei Möglichkeiten verfahren:

- Kosmetik endet distal der Durchzugsöffnung für den langen Riemen.
- Kosmetik endet im distalen Drittel des Schaftes. Sie wird vor dem Anziehen des Schaftes Richtung Knie geschoben und nach dem Anziehen wieder hochgezogen. Das KISS®-System befindet sich unter dem Kosmetikschaum.
- Kosmetik endet proximal der Durchzugsöffnung für den Einzugriemen. In die Kosmetik wird eine Öffnung für den langen Riemen geschnitten. Das KISS®-System ist auf der Aussenseite des Kosmetikschaumes.

7 Hinweise zur Nutzung


7.1 Anlegen des Systems

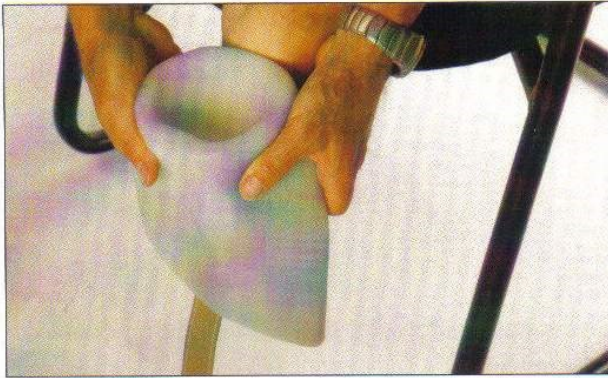


Zugeschnittenen Liner auf links ziehen und am Stumpfende ansetzen.



Liner am Stumpf abrollen.

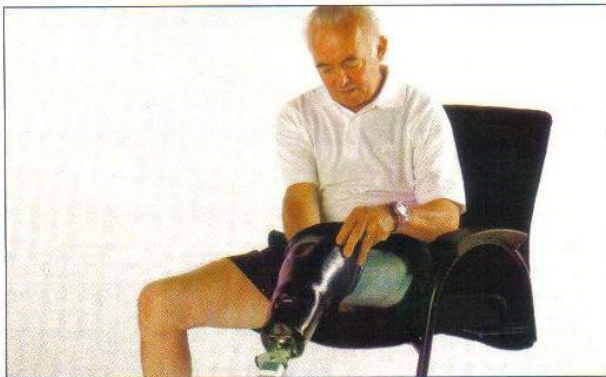

Im Sitzen den langen Riemen durch den Basiskörper schieben.

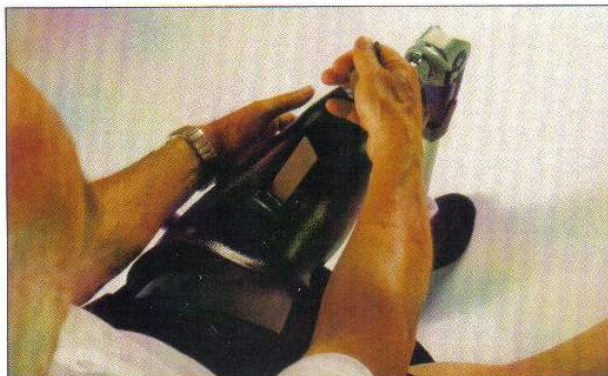

Stumpf am langen Riemen in den Schaft einziehen. Dabei darauf achten, dass der proximale kurze Riemen durch die proximale Öffnung tritt.