

Reinigungsanleitung für Silikonprothesen/Silikonorthesen

Das verwendete Silikonmaterial besitzt unter anderem die Eigenschaft, dass Schweiß, Hautfette, Cremes usw. in und durch das Material dringen.

Wenn diese Rückstände nicht täglich entfernt werden, können sich diese zwischen den einzelnen Schichten festsetzen und das Material soweit schwächen, dass es zu Rissen oder Ablösungen kommen kann.

Um diese zu vermeiden, sollten Sie folgende Punkte beachten:

- Benötigen Sie ein Hilfsmittel um die Prothese/Orthese anzuziehen, verwenden Sie nur Wasser, Puder oder das mitgelieferte bzw. bei uns erhältliche Gleitgel.
- **Keine Cremes benutzen.**
- Tägliches Auswaschen mit Wasser und hautfreundlicher Seife.
- 1 mal monatlich muss die Prothese/Orthese ins kochende Wasser gelegt werden, das sollte nur unter **Aufsicht** und mit ausreichend Wasser geschehen, etwa 20 Minuten.
- Prothese/Orthese niemals mit scharfen Chemikalien, Putzmittel usw. reinigen.
- Temperaturen über 160°C können zu Schädigung führen.
- Bei Einschnitten, Abnutzungen, Einrissen, Abhebungen, Verfärbungen oder andere Auffälligkeiten sollten Sie sich unverzüglich mit uns in Verbindung setzen.